


VENÜS³⁶⁰
DİJİTALDE
UZAY
Çağr

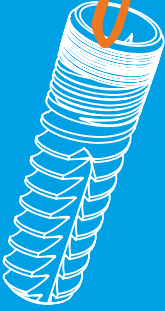


Venuscon Exocad Kütüphane Yükleme Rehberi

MEDİSOLARİS.COM DAN İNDİRDİĞİNİZ DOSYAYI AÇINIZ


 VENUSCON EXOCAD KULLANIM KILAVUZU.pdf

 Venüscon Exocad Library.zip


AÇILAN RAR DOSYASINDA VENUSCON KLASÖRÜNE GİRİNİZ

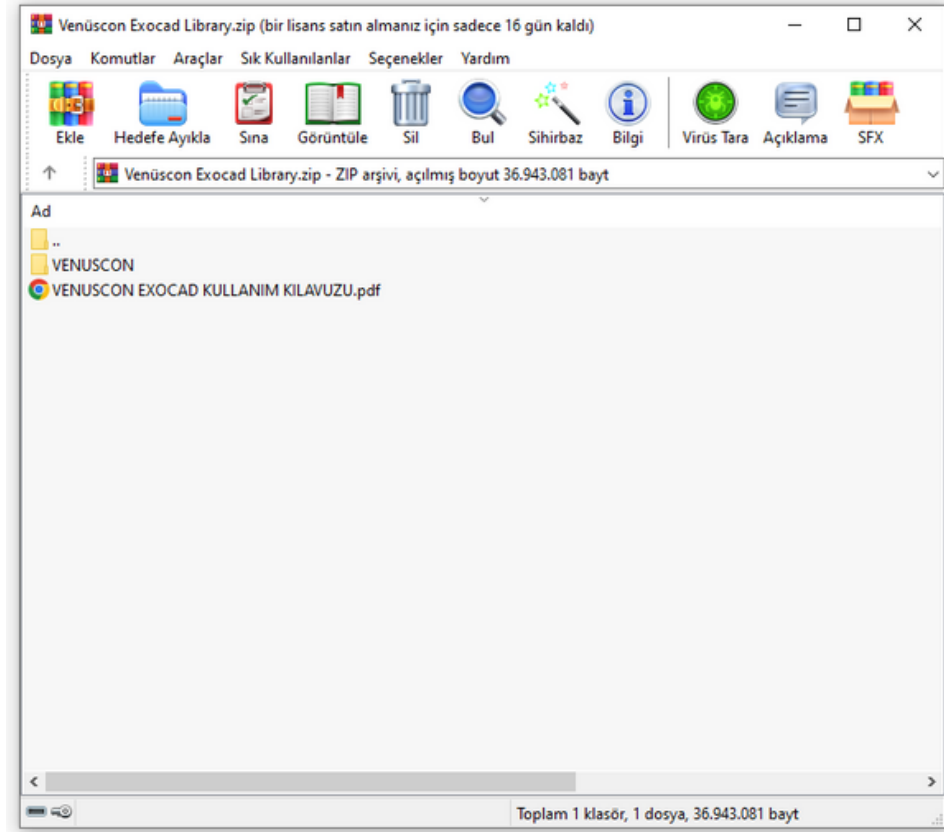

AÇILAN RAR DOSYASINDA VENUSCON KLASÖRÜNE GİRİNİZ

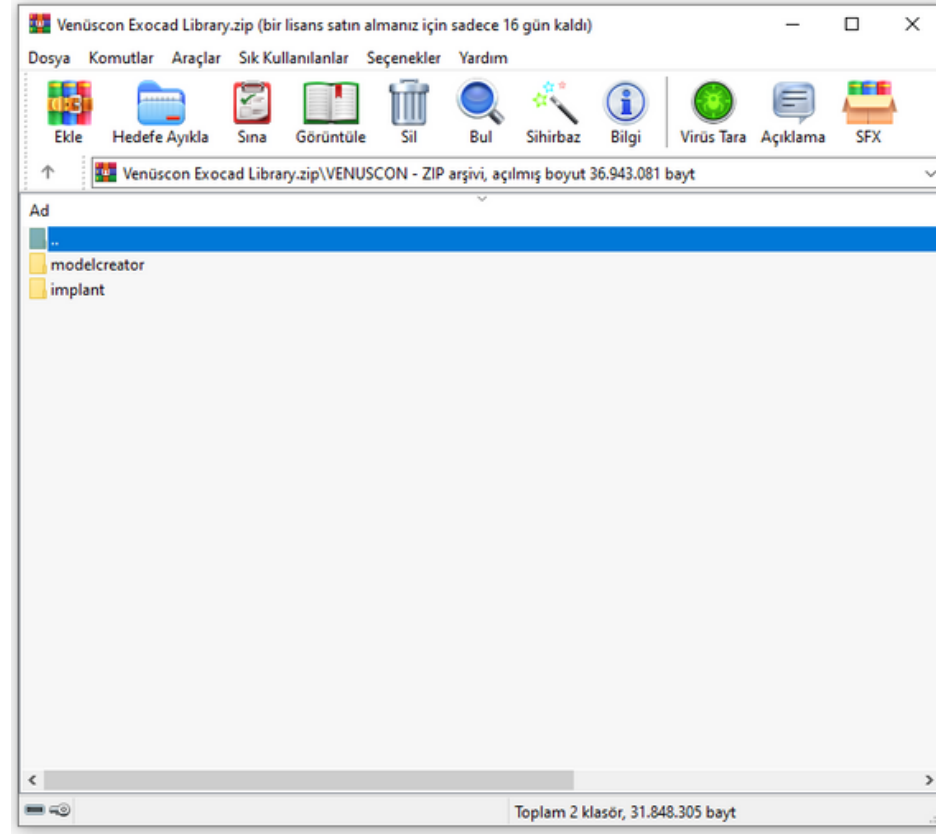


ARDINDAN \\DentalCADApp\library KONUMUNA GİRİNİZ

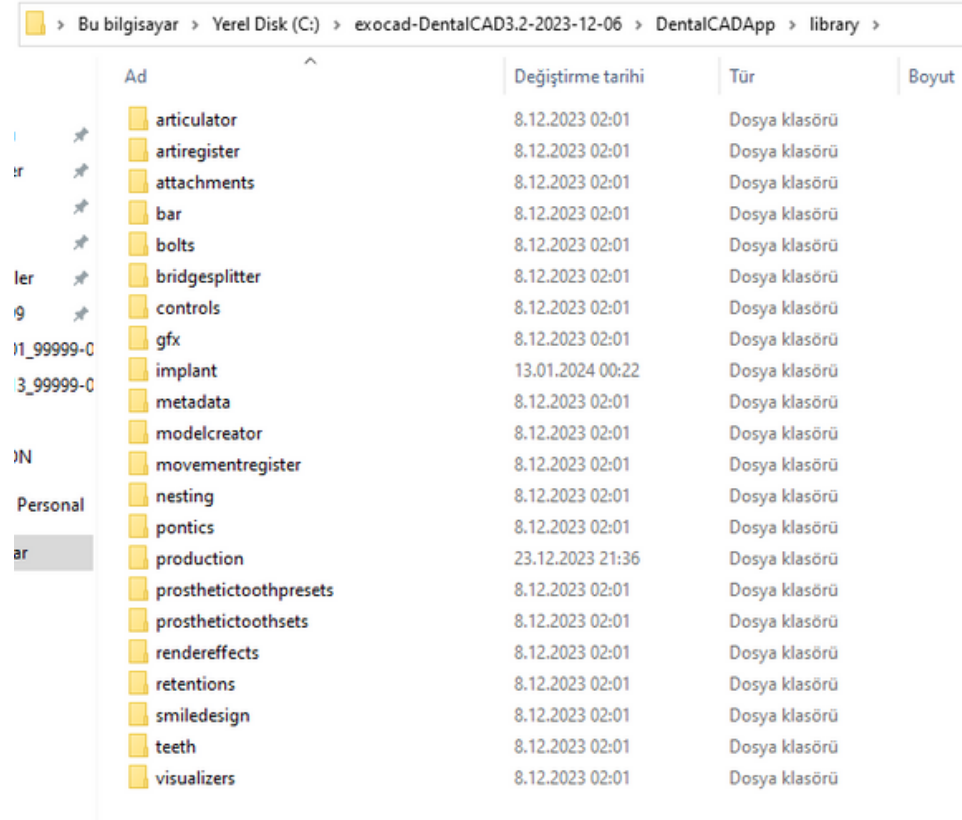

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
articulator	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
artiregister	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
attachments	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bar	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bolts	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bridgesplitter	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
controls	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
gfx	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
implant	13.01.2024 00:22	Dosya klasörü	
metadata	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
modelcreator	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
movementregister	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
nesting	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
pontics	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
production	23.12.2023 21:36	Dosya klasörü	
prostheticoothpresets	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
prostheticoothsets	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
rendereffects	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
retentions	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
smiledesign	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
teeth	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
visualizers	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	


RAR KLASÖRÜNDEKİ İMPLANT VE MODELCREATOR DOSYALARINI LIBRARY KLASÖRÜNE ATIYORUZ

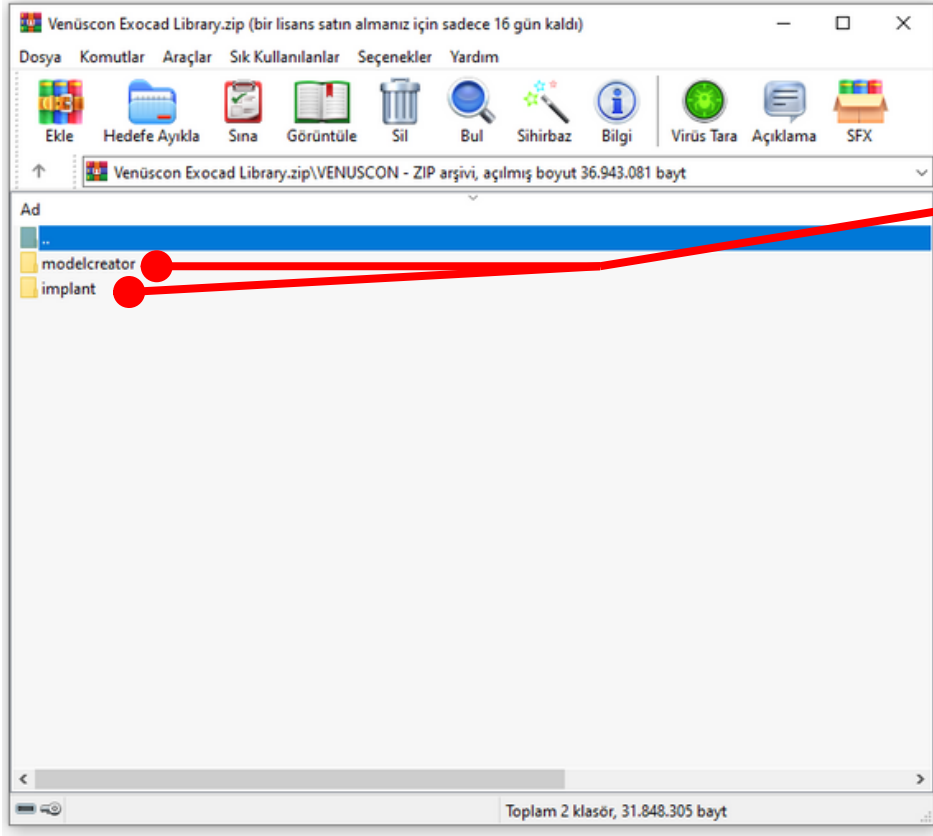

Bu bilgisayar > Yerel Disk (C:) > exocad-DentalCAD3.2-2023-12-06 > DentalCADAn library >

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
articulator	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
artiregister	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
attachments	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bar	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bolts	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
bridgesplitter	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
controls	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
gfx	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
implant	13.01.2024 00:22	Dosya klasörü	
metadata	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
modelcreator	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
movementregister	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
nesting	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
pontics	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
production	23.12.2023 21:36	Dosya klasörü	
prosthodonticpresets	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
prosthodonticsets	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
rendereffects	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
retentions	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
smiledesign	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
teeth	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	
visualizers	8.12.2023 02:01	Dosya klasörü	

HEDEFTEKİ DOSYALARI DEĞİŞTİR DİYORUZ VE İŞLEM TAMAMLANIYOR

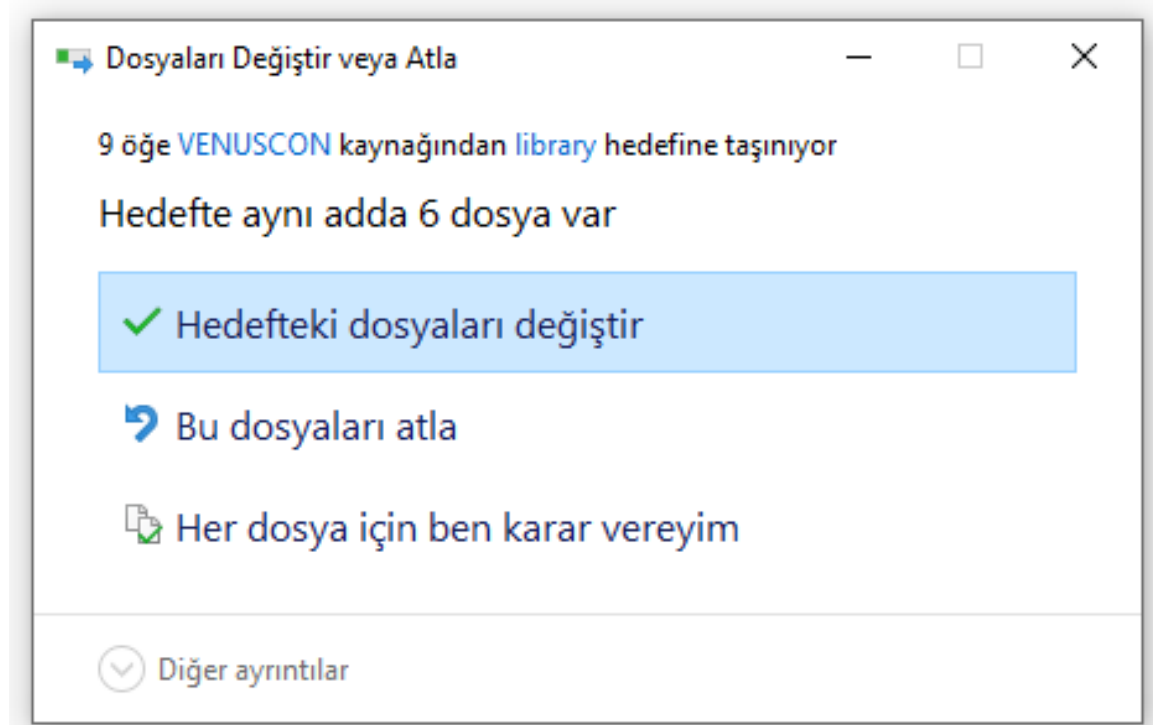

**EXOCAD BİR TASARIM AÇIK İKEN İŞLEMİ YAPIYORSANIZ DENTALCADAPP KAPATIP
AÇTIKTAN SONRA VENUSCON LIBRARY GELECEKTİR**

TEŞEKKÜRLER

HAZIRLAYAN CDT.HASAN YILMAZ

ArtMeets

www.medisolaris.com